


## Kortfattet brukerveiledning


### VACUETTE® Sikkerhetsrørholder QUICKSHIELD

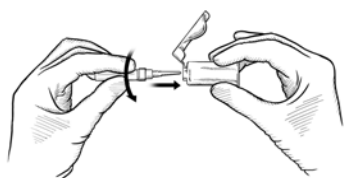

Fjern det grå dekselet fra ventildelen av kanylen (vri og dra).



Sett ventildelen på kanylen loddrett inn i rørholderen slik at den sorte el. hvite prikken vender oppover og beskyttelsesskjoldet på holderen vender til den siden man ønsker å ha det under prøvetakingen. Skru kanylen inn i rørholderen. Kontroller at kanylen er godt festet slik at den ikke løsner under bruk.

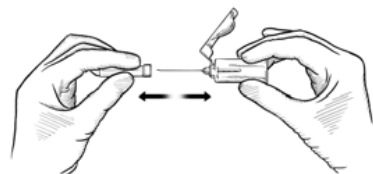

Trekk av beskyttelseshylsen på kanylen.



Utfør venepunksjon.



Press beskyttelsesskjoldet over kanylen med tommel eller pekefinger umiddelbart etter at kanylen er trukket ut av åren.



Beskyttelsesskjoldet låses fast over kanylen med et hørbart "klikk".



Kast rørholderen med kanylen i en dertil egnet beholder.